



LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ODDĚLENÍ PATOLOGIE

LP-02-2011-UHN

Verze provedení/dostupnost/počet stran	4.0 / ox.nspuh.cz
Autor (jméno, funkce, podpis)	Petra Matuščíková, vedoucí laborantka PAT, v. r.
Datum vypracování	9.6.2016
Oponent (jméno, funkce, podpis)	MUDr. Antonín Večeřa, primář PAT, v. r.
Datum oponentury	10.6.2016
Schválil (jméno, funkce, podpis)	MUDr. Petr Sládek, předseda představenstva, v. r.
Datum schválení	13.6.2016
Vydal	Bc. Jitka Bílková, v. r.
Datum vydání	13.6. 2016
Platnost/účinnost	Dnem vydání/dnem vydání

PŘEHLED VYDANÝCH ZMĚN

Číslo změny	Termín změny	Rozsah provedené změny	Zapsal	Datum zápisu	Podpis
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

PŘEHLED REVIZÍ

Číslo revize	Výsledek revize: návrh na změnu, doporučení	Revizi provedl: jméno a příjmení	Datum
			Podpis
1.			
2.			
3.			
4.			

PROTOKOL
o seznámení zaměstnance s LP-02-2011-UHN

Zaměstnanec podpisem protokolu potvrzuje, že byl s předpisem řádně seznámen ve smyslu § 301 písm. c) zákoníku práce a že jednotlivým ustanovením porozuměl.

Poř. číslo	Datum Seznámení	Identifikační údaje zaměstnance - pracoviště			Poznámka
		Jméno	útvár	podpis	
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					

Oddělení patologie
Uherskohradištská nemocnice
J. E. Purkyně 365
686 68, Uherské Hradiště

Primář: MUDr. Antonín Večeřa
572 529 830

Vedoucí laborantka: Petra Matušíková
572 529 831
Po-pá 7:00 - 15:30 hod.

OBSAH

I. Účel.....	4
II. Charakteristika pracoviště oddělení patologie.....	4
III. Materiál zpracováváný na oddělení patologie	5
IV. Preanalytické procesy v laboratoři.....	9
V. Organizace oddělení patologie.....	10
VI. Administrativa	12

I. Účel

Tato laboratorní příručka je dokumentem, sloužícím ke zlepšení komunikace mezi oddělením patologie a ostatními odděleními naší nemocnice. Obsahuje pokyny týkající se správného odběru, fixace a zacházení s materiálem pro histologická a cytologická vyšetření. Všechny tyto kroky jsou nutné pro splnění základních požadavků, které vedou ke stanovení správné diagnózy.

II. Charakteristika pracoviště oddělení patologie

Oddělení patologie provádí základní a specializovaná vyšetření biologického materiálu humánního původu v odbornostech: 807, 823.

Materiál na odd. patologie zpracovávají zdravotní laboranti a lékaři. Práce související s prováděním pitev, manipulaci se zemřelými a komunikaci s pozůstalými zajišťují pitevní sanitáři. Hodnocení biopsií, nekropsií, cytologií, speciálních vyšetření a provádění pitev zajišťují lékaři.

Oddělení patologie splňuje základní technické a personální požadavky a požadavky odborné společnosti.

Oddělení patologie získalo v roce 2016 Osvědčení o splnění podmínek Auditu II, č. DAB-032-2016-0443-823.

III. Materiál zpracováváný na oddělení patologie

III.1 Materiál k bioptickému vyšetření

III.1.A Resekáty a ektomie

- hrtan
- plíce
- žaludek
- žlučník
- appendix
- tenké střevo
- tlusté střevo
- konečník
- anální kanál
- močový měchýř
- ledvina
- děloha, adnexa, ovaria
- placenta
- chámovod, nadvarle, varle
- slinná žláza
- štítná žláza
- prsní žláza
- slezina
- lymfatické uzliny

Odběr materiálu provádí klinik podle postupů daných příslušnými odbornými společnostmi. Materiál, pokud není nadměrných velikostí, musí být odebrán tak, aby topografické poměry byly jasně prokazatelné, případně označené pro jasnou orientaci. Místa, na která chce klinik zvláště upozornit, označí stehem, ponechá vodič, či označí barevně.

III.1.B Diagnostické excize

- kožní excize
- prsní žláza
- slinné žlázy
- sliznice
- synoviální tkáň
- měkké tkáně

III.1.C Kyretáže

- cervikální kanál
- dutina děložní

III.1.D Endobiopsie

- sliznice jícnu
- sliznice žaludku
- sliznice duodena
- sliznice tenkého střeva
- sliznice tlustého střeva

- sliznice konečníku
- nosní sliznice
- bronchiální sliznice
- sliznice močového měchýře

III.1.E Punkční biopsie

- prsní žláza
- prostata
- játra
- plíce
- měkké tkáně

III.2 Pravidla zacházení s biologickým materiálem pro bioptické vyšetření (stanovenými pravidly se řídí klinické pracoviště, které materiál odebralo)

III. 2. A Fixace

Fixace je rychlé vysrážení (denaturace) bílkovin plazmy buněk a tkání fixačními prostředky, které mají zabránit samovolnému rozkladu tkáně (autolýze).

Nejčastěji používaným fixačním prostředkem je 10 % formalín, výchozí surovinou pro přípravu formalínu je vodný roztok formaldehydu, který je dodáván do laboratoře jako 35 % vodný roztok.

Formalín je bezbarvá, zdraví škodlivá kapalina, silně dráždící sliznici, patřící do skupiny kancerogenů první třídy, při manipulaci s ním je nutno dodržovat přísná bezpečnostní pravidla.

Pravidla fixace

- tkáň musí být do fixačního roztoku uložena co nejdříve
- nesmí ležet volně na vzduchu
- nefixovaná tkáň nesmí přijít do kontaktu s vodou (ani destilovanou)
- dostatečné množství fix. roztoku (minimální poměr 1:5)
- dostatečně velká odběrová nádoba
- nutno zajistit průnik fix. roztoku do hlubších vrstev tkáně a přístup fixativa ke tkáni ze všech stran
- do nádoby nejdříve nalít fix. roztok, poté teprve vložit tkáň (zabrání se tak přilepení tkáně ke stěně nádoby)
- nepoužívat nádoby s užším hrdlem
- nádoby dobře uzavírat (nebezpečí vylití během transportu)
- pozor na záměnu fixačního činidla s jiným roztokem

Nedodržování těchto pravidel je nutno považovat za postup non lege artis.

III.2.B Označení vzorku

Nádobku s materiálem označit štítkem. *Štítek musí obsahovat tyto údaje:*

- jméno a příjmení pacienta
- rodné číslo
- oddělení
- v případě odesílání materiálu od jednoho pacienta ve více nádobách je nutno specifikovat vzorek (topografií), např. - 1. sliznice sigmatu, 2. sliznice rektu
- údaje na štítku musí být shodné s průvodním listem

III.2.C Průvodní list

Průvodní list k zásilce biotického materiálu musí obsahovat tyto údaje:

- jméno a příjmení pacienta
- rodné číslo, případně datum narození a pohlaví (cizinci, novorozenci)
- kód zdravotní pojišťovny pacienta, event. informaci o způsobu úhrady
- diagnóza
- specifikace biopsie (topografie, požadované vyšetření, anamnéza, medikace, laboratorní hodnoty apod.)
- datum odběru
- hodina odběru
- identifikace objednavatele - oddělení, IČP
- razítko objednavatele
- podpis lékaře

III.3 Peroperační biopsie

Peroperační biopsie je prováděna během pracovní doby, v průběhu operace, kdy se operátor potřebuje přesvědčit o změnách histologické stavby tkáně nebo orgánu. Používá se metoda rychlého zpracování tkáně zmrazením. Výsledek vyšetření může značně ovlivnit další průběh operace. Preparát je zhotovován v co nejkratším čase.

Chirurg odebere pacientovi část tkáně, nebo celou patologicky změněnou tkáň, tato je označena a spolu s průvodním listem v nativním stavu doručena na patologii. Patolog biopsii změří, popíše, zorientuje a odebere reprezentativní vzorek. Laborant vzorek tkáně zmrazí a následně nakrájí na velmi tenké řezy ve zmrazovacím mikrotomu (kryostat). Řezy se poté barví metodou hematoxylin – eosin ve zkrácených časech.

Výsledek peroperační biopsie sděluje patolog operátorovi telefonicky do třiceti minut od dodání materiálu. Výsledek peroperační diagnózy je zapsán též do definitivního výsledku vyšetření materiálu odebraného pacientovi během operačního výkonu.

Požadavky na preanalytickou část vyšetření:

- požadavek na peroperační biopsii (pokud je to možné) telefonicky nahlásit předem
- zasílá se nefixovaný materiál
- nádoba s materiálem musí být označena identifikačním štítkem
- spolu s materiálem musí být doručen průvodní list se všemi náležitostmi a telefonním číslem operátora či operačního sálu

III.4 Negynekologická cytologie

III. 4. A Vyšetření tělních tekutin a výplachů

Dodání těchto materiálů do laboratoře musí být co nejrychlejší, z důvodu nebezpečí rozpadu buněk. Pokud toto pravidlo není možno dodržet, vyžadujeme pořízení nátěrů ze sedimentu klinikem.

Nátěry je nutné fixovat zaschnutím na vzduchu.

Pokud není možno dodržet ani jednu z těchto zásad, doporučujeme materiál fixovat 50% alkoholem v poměru 1:1.

Maximální množství dodaného materiálu by nemělo přesáhnout 1l.

III.4.B Tenkojehlová aspirační cytologie

- štítná žláza
- prsní žláza
- uzliny
- slinné žlázy
- trasbronchiální punkce
- ložiska hmatná nebo detekovatelná znázorňovacími metodami
- synoviální tekutina
- cysty

III.4.D Kartáčové stěry

- bronchiální sliznice

III.5 Pravidla zacházení s biologickým materiálem pro cytologické vyšetření

III. 5. A Označení vzorku

Nádobka s materiálem, nebo natřená skla označit štítkem. *Štítek musí obsahovat tyto údaje:*

- jméno a příjmení pacienta
- rodné číslo
- oddělení
- v případě odeslání materiálu od jednoho pacienta ve více nádobkách nebo na více sklech nutno vzorek specifikovat

III.5.B Průvodní list

Průvodní list k zásilce cytologického materiálu musí obsahovat tyto údaje:

- jméno a příjmení pacienta
- rodné číslo, případně datum narození a pohlaví (novorozenci, cizinci)
- kód zdravotní pojišťovny pacienta, event. informaci o způsobu úhrady
- diagnóza
- specifikace cytologie (topografie, požadované vyšetření, anamnéza, medikace, laboratorní hodnoty apod.)
- datum odběru
- hodina odběru
- skutečné množství odebraného materiálu
- identifikace objednatele – oddělení, IČP
- razítko
- podpis lékaře

Možné chyby při zpracování a manipulaci s cytologickým materiálem:

- pozdní dodání materiálu
- příliš silný nátěr na skla
- slepená skla
- nešetrná manipulace s pořízenými nátěry

IV. Preanalytické procesy v laboratoři

IV.1 Příjem materiálu

Materiál je přijímán na oddělení patologie v pracovní dny (PO – PÁ) od 7:00 do 15:00 hodin, v místnosti označené jako příjem materiálu. Materiál je zkontrolován, spolu s průvodním listem označen číslem a zapsán do příjmové knihy. Administrativní pracovnice ještě provede kontrolu průvodního listu v elektronické podobě a přiřadí laboratorní číslo. Cytologický materiál je zpracováván ihned, biopsie jsou dále fixovány (*minimálně 24 hodin*).

IV.2 Podmínky pro přijetí biologického materiálu

Veškerý biologický materiál je přijat v řádně označených nádobách, v případě pořízení nátěrů na skla na řádně označených sklech.

S materiálem musí být doručeny průvodní listy se všemi požadovanými údaji, tyto musí být shodné s údaji na štítku označující nádobu s materiálem či sklo.

- Je-li dodán materiál bez průvodního listu, je tato skutečnost telefonicky sdělena na odesílající oddělení s žádostí o dodání chybějícího průvodního listu. Materiál je dále zpracován až po obdržení průvodního listu.
- Je-li dodán průvodní list bez materiálu, je tato skutečnost telefonicky sdělena na odesílající oddělení a požadován chybějící materiál. Po obdržení chybějícího materiálu a přiřazení průvodního listu je materiál zpracován.

IV.3 Postup při doručení vadného materiálu

- Je-li biotický materiál dodán v porušeném či rozbitém obalu, je laborantem vložen do nové nádoby, zalit fixačním roztokem, označen a zpracován. Tato skutečnost je zaznamenána na průvodní list materiálu a sdělena odesílajícímu lékaři v nález vyšetření.
- Je-li biotický materiál dodán bez fixační tekutiny (např. došlo k vylití), je laborantem zalit fixační tekutinou a zpracován. Tato skutečnost je zaznamenána na průvodní list materiálu a sdělena odesílajícímu lékaři v nález vyšetření.
- Je-li zjištěna záměna fixační tekutiny, je materiál vložen do nové nádoby, označen, zalit správným fixačním roztokem a zpracován. Tato skutečnost je zaznamenána na průvodní list materiálu a sdělena odesílajícímu lékaři v nález vyšetření, zároveň je odesílající oddělení upozorněno, aby nedošlo k dalšímu používání nesprávného roztoku.

- Je-li dodáno rozbité sklo, částečně zachovalé, pak jej lze obarvit a odečíst limitovaný nátěr. Tato skutečnost je zapsána na průvodní list materiálu a sdělena odesílajícímu lékaři v nález vyšetření.
- Je-li dodáno zcela rozbité sklo, nelze jej obarvit a odečíst. Tato skutečnost je zapsána na průvodní list materiálu a sdělena odesílajícímu lékaři v nález vyšetření

Všechny nesrovnalosti jsou zároveň zaznamenávány do „Knihy nesrovnalostí na příjmu biotického materiálu a Knihy nesrovnalostí na příjmu cytologického materiálu.“

V. Organizace oddělení patologie

V.1 Bioptická a cytologická laboratoř

V.1.A Zpracování materiálu

Zpracování řádně prefixovaného bioptického materiálu začíná přikrojením do bloků (zablokováním) o velikosti max.1ccm. U každého materiálu je hodnocen vzhled, charakteristika tkáně, je změřen a tyto údaje jsou zaznamenány do průvodního listu. Materiál jako jsou kosti a tvrdé tkáně, je nutno ještě před zablokováním dekalcifikovat (odvápnit).

Přikrojený materiál se dále odvodňuje a prosycuje parafínem do druhého dne za pomoci tkáňového procesoru.

Poté se vzorky zalijí parafínem do kazetek a po ztuhnutí se řežou na zařízení zvaném mikrotom na řezy o síle 2 až 5 tisícín milimetru. Tyto jsou poté přenášeny na podložní skla a po zaschnutí obarveny základní barvicí metodou hematoxylin – eosin a zamontovány umělou pryskyřicí pod krycí sklo. Nakonec se hodnotí kvalita barvení a celkového zpracování preparátu. Takto zpracované preparáty se poté spolu s průvodním listem předávají lékaři k odečtení.

Zpracování cytologického materiálu začíná krátkou fixací v isopropylalkoholu u již natřených skel, nebo (pokud je materiál tekutý) je nutno zhotovit nátěr ze sedimentu, nechat zaschnout a krátce fixovat.

Fixovaná označená skla dále barvíme základní barvicí metodou hematoxylin – eosin a základní barvicí metodou May Grünwald – Giemsa-Romanovski. Po obarvení se nátěr zamontuje, zkontroluje a je předán spolu s průvodním listem lékaři k odečtení. Zbylý cytologický materiál je ještě možno zpracovat formou cytobloku, takový materiál se potom zpracovává stejně jako biopsie.

V.1.B Vyhodnocení preparátů

Výsledkem práce laborantů jsou preparáty, které prohlíží pod mikroskopem lékař – patolog.

Na základě rozpoznání buněk a tkání zachycených v preparátu a eventuálně jejich buněčných a strukturálních změn (při využití všech dostupných informací týkajících se pacienta) stanoví patolog diagnózu. Tato je zaznamenána do výsledného protokolu. Pokud patolog shledá, že preparáty obarvené základním barvením nepostačují k určení konečné diagnózy, rozhodne o dalším testování za pomoci speciálních barvicích a impregnačních metod, nebo metod imunohistochemických.

V.1.C Speciální barvicí metody prováděné na oddělení patologie

Barvení parafínových řezů metodami přehledného barvení

- barvení Weigert van Giesonovo
- barvení Massonovými trichromy (zelený trichrom)

Znázornění vazivových vláken

- barvení na kolagen Weigert van Gieson, zelený trichrom)
- barvení na elastiku (resorcin-fuchsin)
- znázornění retikula (impregnační metoda dle Gömöriho)

Znázornění krevních elementů

- barvení krevních elementů May- Grünwald – Giemsa- Romanovski
- průkaz žírných buněk kresylvioletí

Speciální metody histopatologické

- průkaz amyloidu (barvení kongo červení)

- průkaz amyloidu (barvení saturnovou červení)
- průkaz bakterií v tkáňových řezech (barvení dle Grama – k rozlišení mezi gram-pozitivními a gram-negativními bakteriemi, barvení dle Ziel-Neelsena – k průkazu tuberkulózních bacilů)
- průkaz australského antigenu (orcein)
- průkaz fibrinu (Anderson)
- průkaz plísní (impregnační metoda dle Groccota)
- průkaz helicobacter pylori (modifikace barvení dle Giemsi – Romanovského)
- průkaz neurosekrečních granul (impregnační metoda dle Grimelia)

Metody neurohistologické

- barvení myelinových pochev (luxolová modř)

Znázornění polysacharidů

- barvení neutrálních polysacharidů (PAS reakce)
- průkaz glykogenu (PAS reakce + PAS s natrávením)
- barvení kyselých polysacharidů (alcianová modř)
- barvení kyselých polysacharidů (Hale)
- barvení na hlen (mucikarmín)

Průkaz lipidů

- průkaz lipidů barvivy rozpustnými v tucích (Sudan III.)

Průkaz pigmentů

- průkaz melaninu (reakce s dvojmocným železem – dle Lillieho)
- průkaz bilirubinu (metoda dle Foucheta)

Průkaz anorganických látek

- průkaz železa (Perlsova reakce na trojmocné železo)
- průkaz kalcia (impregnační metoda dle Kossy)

V.1.D Imunohistochemie

Tato metoda je založena na reakci známé protilátky s neznámým (prokazovaným) antigenem.

Metodu lze provádět jak z řezů parafínových, tak z řezů připravovaných na zmrzlo.

Aktuální seznam používaných protilátek je dostupný na odd. patologie.

V.2 Pitevní trakt

Pitevní trakt se sestává ze dvou propustí pro lékaře, předsálí, vlastního sálu se dvěma pitevními stoly, místnosti pro manipulaci se zemřelými, kde se nachází dva chladicí boxy.

Komunikaci s pozůstalými a příjem šatstva zajišťují pitevní sanitáři v pracovní dny (PO – PÁ) od 7.00 do 14.00 hodin v místnosti protokolu. Pozůstalí zde mohou obdržet informace ve formě letáku: „Informace pro pozůstalé“

Pitevní sanitáři také zajišťují agendu zemřelých, jako jsou zápisy do knih, komunikaci s pohřební službou a částečně také komunikaci s odesílajícími odděleními.

Vyplňování dokumentace při úmrtí pacienta a její distribuce

Vyplňování Listu o prohlídce zemřelého řeší prováděcí předpis k zákonu 120 č. 372/2011/Sb. a příslušná vyhláška (289/2012Sb.).

Pokyny k vyplňování Listu o prohlídce zemřelého jsou dostupné v dokumentu Vedení zdravotnické dokumentace - SKPP-09-2013-UHN.

Distribuce dokumentace při úmrtí pacienta:

Klinická část:

A (list 1) – 1x dokumentace pro oddělení do chorobopisu jako kopie
– 2x originál pro **PATOLOGII** (ÚZIS + oddělení patologie)

B2 (list 1) – 1x předá klinické oddělení pozůstalým

B3 (list 1) – 1x předá klinické oddělení pozůstalým (odevzdávají pohřební službě)

Část oddělení patologie:

A (list 2) – 2x pro PATOLOGII (v případě pitvy – 1x list na ÚZIS)

B1 – 1x pro PATOLOGII (matrika)

B2 (list 2) – 1x pro PATOLOGII (v případě pitvy pozůstalým)

B3 (list 2) – 1x pro PATOLOGII (v případě pitvy pohřební službě)

Poznámky k vyplňování dokumentace:

Na jeden z tiskopisů A tužkou (nejlépe nahoře v záhlaví) **uvádět jméno praktického lékaře** (PL, ZL), případně místo jeho ordinace, pokud se liší od místa trvalého bydliště zemřelého.

Poznámka k postupu při vyplňování Listu o prohlídce zemřelého:

V naší organizaci došlo po dohodě s primáři klinických oddělení již před delší dobou ke konsensu ohledně vyplňování této dokumentace. Tato dohoda vyplývá z faktu, že **dle vyhlášky byl v naší organizaci v otázce rozhodnutí o provedení či neprovedení pitvy pověřen vedením naší nemocnice lékař oddělení patologie – patolog (primář oddělení či jeho zástupce).**

Aktuální informace (upřesnění) o provedení či neprovedení patologicko – anatomické pitvy lze řešit telefonicky mezi lékaři našeho zdravotnického zařízení.

Pitvy prováděné na oddělení jsou vždy doplněny histologickým vyšetřením odebraných vzorků tkání (nekropsií), jejichž zpracování je totožné se zpracováním vzorků bioptických.

Manipulace s dokumentací při úmrtí pacienta:

Dokumentaci určenou na oddělení patologie je nutné dodávat s tělem zemřelého a to odděleně od těla zemřelého v samostatné obálce.

VI. Administrativa

Veškerou administrativní práci (zpracování žádanek, zpracování tištěné formy výsledků, archivace výsledků, korespondence, agenda pro pojišťovny) zajišťuje dokumentátorka.

Oddělení patologie je napojeno na nemocniční informační systém (NIS), v němž probíhá veškeré zpracování dokumentace. Fyzický (papírový) průvodní list (originál průvodního listu bioptického a cytologického materiálu dodaného z pracoviště žádajícího vyšetření) a originál pitevního protokolu s výsledky vyšetření jsou archivovány na oddělení patologie.

VI.1 Vydávání výsledků

Výsledky vyšetření jsou vydávány jak v tištěné podobě na průvodním listě, tak v podobě elektronické - dostupné v NIS. Před vydáním jsou výsledky kontrolovány a podepisovány patologem, který dané preparáty vyhodnotil. Kopie průvodních listů a kopie pitevních protokolů s originálními závěry vyšetření provedenými na oddělení patologie, jsou v uzavřených obálcích předány na podatelnu UHN (do obálek vkládá a razítkem potvrzuje

dokumentátorka). Na podatelně jsou výsledky vyšetření přebírány pracovníky příslušných oddělení UHN. Výsledky vyšetření pro externí lékaře jsou zasílány poštou.

Sdělení výsledků

- sdělovat výsledky je možné pouze lékařům naší nemocnice
- lékařům naší nemocnice předáváme výsledky vyšetření buď prostřednictvím NIS, nebo v tištěné podobě, telefonicky sdělujeme pouze výsledky peroperačních biopsií
- v případě žádosti o výsledek jiným subjektem, pacientem, příbuzným či pozůstalým, lze vyhovět požadavku prostřednictvím právního oddělení naší nemocnice
- v případě žádosti externího lékaře (specialista, praktický či závodní lékař) je výsledek zasílán na adresu lékaře

VI.2 Časová dostupnost jednotlivých vyšetření

- výsledky biptických vyšetření jsou při běžném rutinním provozu dodávány do 7 pracovních dnů od přijetí materiálu
- výsledky cytologických vyšetření jsou při běžném rutinním provozu dodávány do 10 pracovních dnů od přijetí materiálu
- výjimku tvoří vyšetření tvrdých tkání, metody speciálního barvení a imunohistochemické metody - (týká se především vyšetření materiálu z prsní žlázy, prostaty, lymfatických uzlin apod.), jejichž zpracování je časově náročnější, časová dostupnost je 14-16 dnů od dodání materiálu, v případě urychlení diagnostického postupu je vždy možnost kontaktovat lékaře patologie
- výsledek peroperační biopsie sděluje patolog operujícímu lékaři do třiceti minut od přijetí materiálu
- v případě nutnosti konzultace jiným patologem, či druhé čtení jiným pracovištěm patologie, je výsledek dostupný ve formě tzv. pracovní diagnózy v termínech uvedených výše, po obdržení výsledku konzultačního vyšetření je tento zasílán na oddělení, které vyšetření požadovalo
- výsledek sekce je dostupný obvykle do 30 dnů, pouze v případě diagnostiky obtížných případů je nutno počítat s dobou delší, nutnou pro provedení všech dostupných vyšetření i mimo zařízení UHN včetně konzultačních vyšetření (dle obtížnosti případů (2 až 3 měsíce). Je-li požadavek ošetřujícího lékaře na urychlení postupu, je vždy možno kontaktovat lékaře patologie.

VI.3 Přehled výsledků laboratorních vyšetření prováděných mimo oddělení patologie UHN

1. Nutná vyšetření v akreditovaných laboratořích na nezbytné doplnění diagnóz testy, které nejsou v našem zařízení k dispozici (HER, FISCH, KRAS, EGFR, ALK, genetická vyšetření – mléčná žláza, neoplazie plic a tlustého střeva)

2. Nutné druhé čtení a konzultace lymfoproliferativních vyšetření nebo podezření na ně, tak jak bylo stanoveno na konsensu odborných společností

3. Konzultační vyšetření ve spolupracujících pracovištích (laboratořích) patologie

4. Konzultační vyšetření na základě žádosti klinických pracovišť našeho nebo i jiných zdravotnických zařízení

Seznam spolupracujících laboratoří a ústavů patologie je dostupný na oddělení patologie UHN.

Likvidace odpadů

Zbytkový biologický materiál je skladován v prostoru k tomu určenému a likviduje se po uzavření výsledkového protokolu. Likvidace probíhá v souladu s organizační směrnicí OS-02-2015-UHN.

Archivace

Všechny tištěné výsledkové protokoly jsou řádně archivovány po dobu deseti let na oddělení patologie dle platného skartačního řádu.

Na oddělení patologie jsou také archivovány tkáňové bločky a to po dobu deseti let, preparáty bioptické, nekroptické a preparáty negynekologických cytologií jsou archivovány pět let.